

Información de producto

FD 333 forte desinfección rápida



FD 333 forte - breve descripción

- Solución alcohólica sin aldehídos lista para usar para la desinfección rápida de la superficies de los productos sanitarios invasivos y no invasivos y del inventario médico en la consulta, el laboratorio y el hospital.
- Tiempo de actuación según la VAH, incl. bacterias de Tb, solo 1 minuto.
- Lista de la VAH, lista de la Asociación Industrial Alemana para la Higiene y la Protección de Superficies (IHO).
- Amplio espectro de acción: bactericida, tuberculicida, micobactericida, fungicida, viricida (virus encapsulados, incl. VHB, VHC, VIH, coronavirus así como virus no encapsulados como adenovirus, poliomavirus SV 40, norovirus, poliovirus).
- Viricida según las directrices DVV/RKI y la norma EN 14476.
- Comprobado según los métodos de la VAH y las normas europeas actuales.
- Comprobadas según las directrices EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615 así como mediante el ensayo de 4 campos de la VAH y la norma EN 16615.
- Buena compatibilidad con los materiales.
- Olor refrescante a limón.
- Especialmente recomendado para la aplicación en combinación con FD multi wipes/FD multi wipes compact.

Propiedades

FD 333 forte del sistema de higiene Dürr es una solución alcohólica sin aldehídos lista para usar para la desinfección rápida de las superficies resistentes al alcohol de los productos sanitarios invasivos y no invasivos y del inventario médico en la consulta, el laboratorio y el hospital. FD 333 forte destaca por su efecto rápido y una excelente compatibilidad con los materiales. Las superficies desinfectadas se secan rápidamente. FD 333 forte se recomienda especialmente usarlo en combinación con FD multi wipes/FD multi wipes compact.

Composición del producto

FD 333 forte se basa en una combinación de alcoholes y compuestos de amonio cuaternario. 100 g de FD 333 forte contienen 55,5 g de etanol, 10 g de 1-propanol, 0,05 g de cloruro de didecildimetilamonio, adyuvantes y agua.

Eficacia microbiológica

FD 333 forte posee efecto bactericida¹⁾, tuberculicida¹⁾, micobactericida¹⁾, fungicida¹⁾, viricida (virus encapsulados incl. HBV, HCV y HIV^{2), 3)} así como virus no encapsulados como adenovirus^{1), 2)}, poliomavirus SV 40²⁾, norovirus^{1), 2)}, poliovirus^{1), 2)}). FD 333 forte está en la lista de la VAH, lista de la Asociación Industrial Alemana para la Higiene y la Protección de Superficies (IHO). Comprobados según las directrices RKI/DVV y las normas EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615.

Aplicación

FD 333 forte se utiliza sin diluir. Aplique FD 333 sobre un paño y humedezca completamente las superficies. Limpie las superficies y los objetos a desinfectar y deje actuar el producto. Desinfecte las superficies visiblemente contaminadas con FD 333 forte y elimine la suciedad con un paño. Vuelva a desinfectar las superficies limpiadas. Preste siempre atención a humedecer completamente durante todo el tiempo de actuación. El tiempo de actuación es de 1 minuto según la VAH, para mohos de 2 minutos y para virus 30 - 60 segundos. Utilice del mismo modo las toallitas FD multi wipes/FD multi wipes compact empapadas con FD 333 forte.

Información de producto

FD 333 forte desinfección rápida

Impacto ambiental

El embalaje, de polietileno y polipropileno, se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. Para el reciclaje, enjuague la botella con agua.

Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad.

Datos físicos

Aspecto: solución transparente, incolora

Densidad: $D = 0,87 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

Punto de ignición: 16,5 °C

Vida útil

3 años

3 meses tras la apertura del recipiente; 3 meses si se utiliza con FD multi wipes/FD multi wipes compact.

Tamaños de recipiente

Bidón de 10 l

Botella de 2,5 l

Botella de 1 l

Almacenamiento

Almacenar el producto entre 5 °C y como máx. temperatura ambiente.

Accesorios

Botella pulverizadora (600 ml), cabezal pulverizador para botella de 1 l, grifo para bidón, FD multi wipes/FD multi wipes compact.

Advertencias generales

Antes del reprocesamiento reglamentario, desinfecte el exterior de los productos sanitarios como cámaras intrabucales, turbinas, piezas de mano y contraángulos según las indicaciones del fabricante. Tenga precaución con materiales sensibles al alcohol (p. ej. vidrio acrílico o materiales similares). En el caso de superficies sensibles, compruebe la compatibilidad con el material en una zona no visible. Conviene evitar el secado de FD 333 forte sobre superficies de aluminio. Para indicaciones relativas a la protección con-

Aplicación	Tiempo
Desinfección de superficies (métodos de la VAH) ¹⁾	1 min.
Bacterias ¹⁾ y levaduras ¹⁾	1 min.
Micobacterias ¹⁾	1 min.
Bacterias de Tb ¹⁾	1 min.
Mohos ¹⁾	2 min.
Virus encapsulados, incl. VHB, VHC, VIH, coronavirus ^{2), 3)}	30 s.
Virus no encapsulados ^{1), 2)}	1 min.
Adenovirus ^{1), 2)}	30 s.
Poliomavirus SV 40 ²⁾	1 min.
Norovirus ^{1), 2)}	30 s.
Poliovirus ^{1), 2)}	1 min.

1) Ensayo con carga reducida y elevada (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615).

2) Ensayo sin y con carga según las directrices DVV/RKI.

3) Según recomendación del instituto Robert Koch (informe del organismo alemán para la sanidad federal Bundesgesundheitsbl. 60, 353 - 363, 2017).

tra incendios y explosiones, consulte la norma 107-002 del seguro obligatorio de accidentes alemán DGUV/BGR 206. No mezcle FD 333 forte con otros productos. Se pueden producir cambios en el color y olor del producto, especialmente cuando se almacena expuesto a la luz solar. No obstante, estos cambios de color y olor no influyen sobre la capacidad desinfectante del producto. Para uso exclusivo por parte de personal especializado. Todos los incidentes graves relacionados con el producto se notificarán sin demora al fabricante y a la autoridad competente de su estado miembro.

Advertencias de seguridad

El FD 333 forte está clasificado y etiquetado según el reglamento CLP: ver etiquetado y ficha de datos de seguridad del producto.

Dictámenes periciales independientes – estudios propios

Los dictámenes periciales están disponibles a petición.

CE 0124

Distribuida por

Dürr Dental SE
Höpfheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerdental.com
info@duerrdental.com

Fabricante

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de

